

KIT ANTIDECUBITO *LIBRA I* ***Ref. AK-806***



Descrizione

Sistema antidecubito *Libra I*, appositamente progettato per offrire comfort e prevenzione alle persone allettate. Composto da un sovramaterasso a 18 elementi intercambiabili in Nylon/PVC con tubi di connessione a 2 vie, una base in Nylon/PVC, una fodera in Nylon/PU, un compressore con manopola di regolazione della pressione.

Destinazione d'uso

Kit per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti allettati, allo scopo di distribuire meglio le pressioni nei punti di contatto del corpo.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Assemblato	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	121452/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ n/a
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2018	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche – Materasso AK-806M


Dimensioni	190 cm x 88 cm x 11 cm
Materiali	Elementi in Nylon/PVC. Base in Nylon/PVC. Fodera in Nylon/PU.
Numero elementi	18
Valvola di sgonfiaggio	No
Funzione cuscino	No
Tipologia connettori	A tubo
Portata massima	120 kg
Fodera	Con bottoni

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Caratteristiche Tecniche – Compressore AK-806C

Dimensioni	28 cm x 15 cm x 9 cm
Peso	1,4 kg
Alimentazione	220 V / 50 Hz , 1 A
Potenza assorbita	7 W
Flusso d'aria	8 l/min
Range di pressione	40 mmHg – 100 mmHg
Regolazione della pressione	Tramite manopola
Ciclo di lavoro	12 minuti

Funzioni compressore

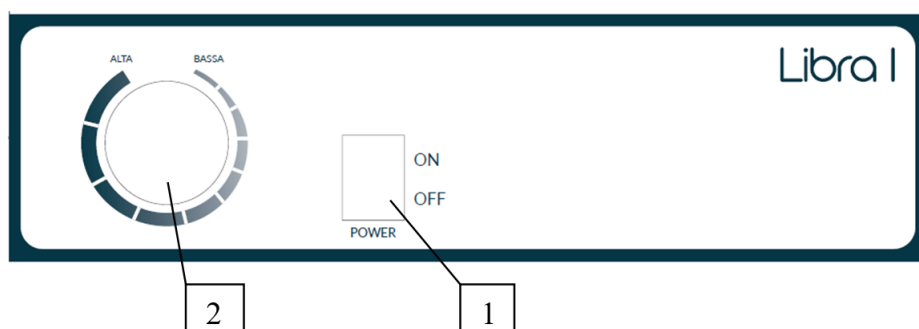

Tasto di accensione (1) [Power]

- Premendo il tasto ON/OFF e il pulsante di alimentazione sul pannello, il compressore si avvia o si arresta.

Regolatore della pressione di lavoro (2)

- Ruotare il regolatore per impostare il livello di pressione desiderato.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza del kit e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non usare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. Il dispositivo non è sterilizzabile in autoclave.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AK-806	Kit antidecubito <i>Libra I</i> , con sovrामaterasso a 18 elementi, tubi a 2 vie, fodera e compressore.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

