

Litecross 90/91®



Corsetti in tessuto Sensitive®

PR1-1090C basso crema
PR1-1090H basso azzurro
PR1-1090S basso nero
PR1-1091C alto crema
PR1-1091H alto azzurro
PR1-1091S alto nero

Leggere attentamente
e per intero
le seguenti istruzioni.



9DCFG000701TA05_0512

CARATTERISTICHE



Struttura in tessuto esclusivo Sensitive®, indemagiabile antistatico, traspirante

Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato



Chiusura anteriore a velcro

4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti



Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua

INDICAZIONI

Lombalgie

Lombosciatalgie e lombocruralgie

Spondiloartrosi
e discopatie lombari

Traumi lievi della colonna lombosacrale
e contratture paravertebrali lombari

Decorso postoperatorio

Esiti di cedimenti vertebrali lombari
(solo LITECROSS 91)

Trattamento della frattura
dei processi trasversi
(solo LITECROSS 91)

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.



RO+TEN s.r.l.
Sede operativa e amministrativa:
Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)
tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com - info@roplusten.com
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI)
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC).
Befinor AG (CH) Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio




RO+TEN
ORTHOSERVICE
INTERNATIONAL PARTNER

Stare
meglio
fa bene


MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 1 Aprire il busto e fissare provvisoriamente i cinturini in velcro sulle bande laterali (fig.A).
- 2 Posizionare il busto in modo che l'asola sia rivolta verso l'alto.
- 3 Indossare il busto inserendo il pollice nell'asola per accompagnarne la chiusura e fissare bene con la chiusura a velcro centrale (fig.B). Assicurarsi che la chiusura sia ben centrata.
- 4 Stringere il corsetto agganciando i cinturini sulla banda velcrabile anteriore (fig.C). SOLO modelli PR1-1091 - PR1-1091N: stringere prima i cinturini bassi e poi quelli alti.
- 5 Se viene prescritto l'utilizzo di una pelotta lombare (PR1-1078/P oppure PR1-T1000 opzionali), fissarla alla banda in velcro posteriore prima di indossare il busto.


Posizione
di riferimento per
ART. PR1-1090
ART. PR1-1090N

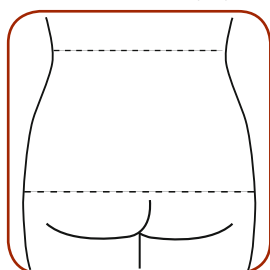

Posizione
di riferimento per
ART. PR1-1091
ART. PR1-1091N

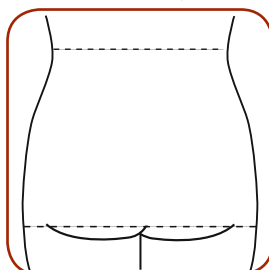

Pelotta lombare
ART. PR1-1078/P
(opzionale)

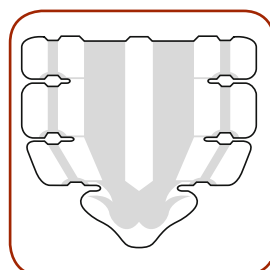

MANUTENZIONE

Istruzioni per il lavaggio:

- Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
- Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management

