



**PR1-1353
PR1-1321**

Busto semirigido
per addome prominente
con tiranti in elastico

Leggere attentamente
e per intero
le seguenti istruzioni.



9DCFG009001TA02.1012

CARATTERISTICHE



Chiusura laterale a velcro con tasca di accompagnamento



Sagomatura speciale per favorire comfort e aderenza



Bordatura indemagliabile

4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali)
in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione

Sistema di trazione a larghe bande elastiche per una pressione
mirata e una perfetta stabilizzazione

Tiranti con verricelli, per il sostegno e la vestibilità

INDICAZIONI

Lombalgie

Lombosciatalgie e lombocruralgie

Spondiloartrosi e discopatie lombari

Traumi lievi della colonna lombosacrale
e contratture paravertebrali lombari

Decorso postoperatorio

Esiti di cedimenti vertebrali lombari

Trattamento della frattura
dei processi trasversi

Scoliosi degenerativa lombare

Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate
dal dispositivo non agiscano su parti del corpo
che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione,
rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo
in vicinanza di fiamme libere o forti campi
elettromagnetici.

MANUTENZIONE

Istruzioni per il lavaggio:

Sfilare le stecche rigide aggiuntive (se presenti)

Lavare a mano in acqua tiepida a 30° C
con sapone neutro.

Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente.



RO+TEN s.r.l.
Sede operativa e amministrativa:
Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)
tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com - info@roplusten.com
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI)
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC).
Befinor AG (CH) Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio



RO+TEN
ORTHOSERVICE
INTERNATIONAL PARTNER

Stare
meglio
fa bene

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Inserire, se prescritte, le stecche rigide aggiuntive paravertebrali nelle apposite guide.

- 1 Aprire il busto e fissare provvisoriamente i tiranti elastici sulle bande laterali. Posizionare il busto in modo che la striscia centrale in velcro sia esattamente centrata tra lo sterno e il pube (**fig.A**).
- 2 Portare la banda laterale destra del busto sull'apposito velcro di chiusura, infilando le dita nella tasca di accompagnamento (aletta superiore) ed esercitando la giusta forza di trazione (**fig.B**).
- 3 Terminare il fissaggio della banda laterale (aletta inferiore) (**fig.C**).
- 4 Stringere il busto agganciando i tiranti elastici inferiori l'uno sull'altro (destro su sinistro o viceversa) a livello del pube (**fig.D-E**).
- 5 Agganciare i tiranti alti con la stessa modalità (destro su sinistro o viceversa) scegliendo l'altezza desiderata:
a) sovrapposti ai tiranti inferiori (**fig.F**)
b) al di sopra dei tiranti inferiori.



AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazione qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management

