

sat



Busto semirigido alto
PR1-1622C W crema
PR1-1622H W azzurro
PR1-1654C M crema
PR1-1654H M azzurro
 Busto semirigido basso
PR1-1623C W crema
PR1-1623H W azzurro
PR1-1655C M crema
PR1-1655H M azzurro

Leggere attentamente
 e per intero
 le seguenti istruzioni.



9DCF6011101TA01.0512

CARATTERISTICHE



Sistema di trazione a tiranti elastici e verricelli,
 per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione

4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali)
 in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione

Nuovo inserto posteriore di tessuto in rete, per la massima
 traspirabilità

INDICAZIONI

Lombalgie
 Lombosciatalgie e lombocruralgie
 Spondiloartrosi e discopatie lombari
 Traumi lievi della colonna lumbosacrale
 e contratture paravertebrali lombari
 Decorso postoperatorio
 Esiti di cedimenti vertebrali lombari
 Trattamento della frattura
 dei processi trasversi
 Scoliosi degenerativa lombare
 (solo SAT54 - SAT22)
 Spondilolisi con o senza listesi vertebrale
 (solo SAT54 - SAT22)

PRECAUZIONI D'USO

In soggetti ipersensibili il contatto diretto
 con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni.

È consigliabile indossare un indumento,
 evitando il contatto diretto con la pelle.

Si raccomanda che le pressioni esercitate
 dal dispositivo non agiscano su parti del corpo
 che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

È consigliabile non indossare il dispositivo
 in vicinanza di fiamme libere o forti campi
 elettromagnetici.



RO+TEN s.r.l.
 Sede operativa e amministrativa:
 Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)
 tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34
 www.roplusten.com - info@roplusten.com
 Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI)
 Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
 Befinor AG (CH) Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio




RO+TEN
 ORTHOSERVICE
 INTERNATIONAL PARTNER

Stare
 meglio
 fa bene


MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Inserire, se prescritte, le stecche paravertebrali rigide aggiuntive nelle apposite tasche presenti nella parte posteriore del busto.

- 1 Aprire il busto e fissare provvisoriamente i cinturini in velcro sulle bande laterali. (fig. 1)
Posizionare il busto in modo che l'etichetta interna sia rivolta verso l'alto.
- 2 Indossare busto fissandolo bene con la chiusura a velcro centrale (fig.2).
Assicurarsi che la chiusura sia ben centrata.
- 3 Iniziare a stringere il corsetto agganciando i cinturini bassi sulla banda velcrabile anteriore. (fig. 3)
- 4 Agganciare successivamente i cinturini alti sulla banda velcrabile anteriore. (fig. 4)

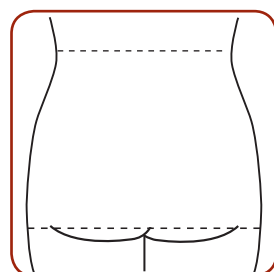

SAT 54-SAT 22

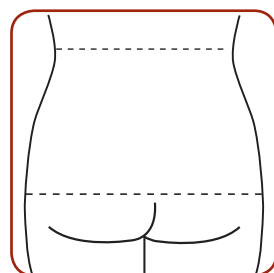

SAT 55-SAT 23

MANUTENZIONE

Istruzioni per il lavaggio:

- Lavare a mano in acqua tiepida a 30° con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
- Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazione qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management

