

lumboFIT[®]70 lumboFIT[®]72



PR1-T1170
Corsetto basso

PR1-T1172
Corsetto alto

Leggere attentamente
e per intero
le seguenti istruzioni.



Prodotto realizzato
in AirX



9DCFG008601TA02_0512

CARATTERISTICHE



Tiranti separati ad alta copertura per un'azione contenitiva, variabile e personalizzata

Struttura anteriore e laterale in fiocco di viscosa ed elastomero

Struttura posteriore in tessuto AirX[™] traspirante: non nocivo, non citotossico, latex free

4 guide posteriori con stecche automodellanti

Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua

Chiusura anteriore a velcro



ACCESSORI OPZIONALI

Stecche rigide modellabili da inserire nelle 4 guide posteriori

Pelota termoformabile

INDICAZIONI

Lombalgie

Lombosciatalgie e lombocruralgie

Spondiloartrosi e discopatie lombari

Traumi lievi delle colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari

Decorso postoperatorio

Esiti di cedimenti vertebrali lombari (PR1-T1172)

Trattamento della frattura dei processi trasversi (PR1-T1172)

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.



RO+TEN s.r.l.
Sede operativa e amministrativa:
Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)
tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com - info@roplusten.com
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI)
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC).
Befinor AG (CH) Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio




RO+TEN
ORTHOSERVICE
INTERNATIONAL PARTNER

Stare
meglio
fa bene

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 1 Aprire il corsetto e fissare provvisoriamente i tiranti in velcro sulle bande laterali.
- 2 Posizionare il corsetto in modo che l'etichetta arancione sia rivolta verso l'alto.
- 3 Tendere il corsetto e fissare bene con la chiusura a velcro centrale (fig.A).
- 4 Stringere il corsetto tendendo i tiranti (fig.B) e agganciandoli sulla banda velcrabile anteriore. Per il modello alto (PR1-T1172) chiudere prima il tirante inferiore, poi quello superiore (fig.C).
- 5 Assicurarsi che il corsetto sia ben centrato sia anteriormente che posteriormente (fig.D).

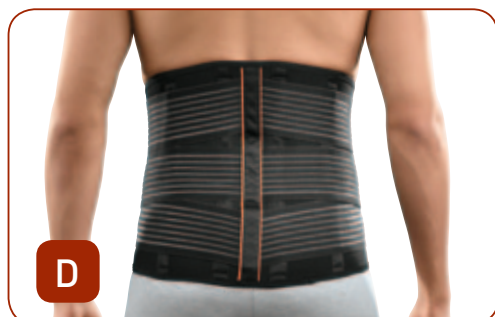

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazione qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management

