

Stabilizzatore sterno-dorsale "Philadelphia"

PS

Art. TO0302

**La cura del corpo in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico ideale per stabilizzare il tratto cervico-dorsale.

La struttura rigida in kydex e l'imbottitura in plastazote garantiscono stabilizzazione e benessere a tutta la zona trattata.

Leggero, confortevole e facile da indossare, non compromette in alcun modo la respirazione e la circolazione sanguigna.

CARATTERISTICHE

Struttura bivalva rigida in kydex e semirigida in plastazote.

Atossico e ipoallergenico.

Chiusure laterali a velcro.

Radiotrasparente.

INDICAZIONI

FRATTURE CERVICO-DORSALI • SPONDILOLISTESI • CEDIMANTI PATOLOGICI • DISCOPATIE • POST-OPERATORIO.

APPLICAZIONE

1. Collegare tra loro le parti con la scritta "BACK" (collare/stabilizzatore) facendo combaciare i fori di riferimento e fissare con i rivetti a pressione presenti sulla struttura stessa.
2. Collegare tra loro le parti con la scritta "FRONT" (collare/stabilizzatore) facendo combaciare i fori di riferimento e fissare con i rivetti a pressione presenti sulla struttura stessa.
3. Applicare la parte BACK a livello dorsale.
4. Applicare la parte con la scritta "FRONT" e adagiare il mento sulla porzione appositamente conformata. Sormontare le parti laterali più spesse a quelle più fini della parte posteriore (BACK).
5. Chiudere il collare con i velcri laterali, tirando quanto basta.
6. Chiudere lo stabilizzatore con i velcri laterali, tirando quanto basta.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Asciugare lontano da fonti di calore.

Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.

Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.

Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.

Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.