



Tutore dorsolombare modulare TenY

TenY

Art. TO1306

La cura della schiena in tutta sicurezza, leggera e confortevole.

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, funzionale e dinamico che estende ed immobilizza la colonna vertebrale. Le spinte di sostegno caratterizzate dal **telaio in lega d'alluminio** leggero, adattabile ed anatomico e dagli **spallacci anatomici** in tessuto elastico, sono studiate appositamente per sostenere il rachide mantenendolo in una posizione fisiologicamente naturale, senza minimamente compromettere la normale respirazione. La struttura è realizzata in tessuto "**C6 Tex** combinato" antistatico, traspirante e termoregolatore, batteriostatico e ipoallergenico, performante (durante l'attività fisica, diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare). Il peso molto ridotto e i tiranti elastici di chiusura, garantiscono un adattamento anatomicamente perfetto. Il sistema di **passanti regolabili** in altezza permettono la modulazione della spinta dorsolombare e a livello delle spalle. L'integrazione di tasche posteriori per l'alloggiamento di **stecche dorsali** permette la modulazione dell'intensità del sostegno. Di facile applicazione grazie al sistema a «zaino» e poco visibile, garantisce inoltre un'ottimale vestibilità.



Fig. 1

INDICAZIONI

- OSTEOPOROSI
- FRATTURE TRAUMATICHE
- CEDIMENTI VERTEBRALI DORSALI E AL PASSAGGIO DORSO-LOMBARE SU BASE OSTEOPOROTICA O METASTATICA
- OSTEOMALACIE FRATTUROSE
- ARTROSI DORSO-LOMBARE
- IPERCIFOSI DORSALI.
- OSTEOCONDROSI GIOVANILE

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

APPLICAZIONE

- 1 Applicare il dispositivo al paziente in posizione eretta o meglio in posizione supina.
- 2 Dopo aver scelto la taglia inerente le misure del paziente, se necessario procedere alla modifica del telaio in alluminio (o delle stecche dorsali) per migliorare l'anatomicità.
- 3 Allargare i tiranti del busto fissandoli provvisoriamente sulle strisce di velcro oblique laterali anteriori (**Fig.2 - A**).
- 4 Inserire i tiranti degli spallacci nei passanti dorsali, avendo cura di effettuare un doppio passaggio (**Fig.1**) : prima nella fessura mediale (**A**) e poi nella fessura laterale (**B**).
- 5 Fissare provvisoriamente i terminali dei tiranti alla striscia di velcro presente sulla giunzione tra spallaccio e tirante (**Fig.2 - B**).
- 6 Indossare il busto infilando le braccia negli spallacci (**Fig.2**).
- 7 Fissare la chiusura a velcro centrale (**Fig.3**).
- 8 Stringere il busto ancorando i due tiranti sul velcro anteriore centrale, dopo averli staccati dalla striscia di velcro obliquo laterale (**Fig.4**).
- 9 Se necessario regolare l'altezza dei passanti dorsali, staccandoli e riposizionandoli sull'apposita striscia di velcro (**Fig.1**).
- 10 Fissare quindi i tiranti degli spallacci sul velcro centrale anteriore, dopo averli staccati dalla striscia di velcro di ancoraggio (**Fig.5-6**).
- 11 Se i tiranti degli spallacci dovessero risultare troppo lunghi rimuovere i terminali a velcro, tagliare la parte in eccesso e riposizionare correttamente i terminali (**Fig.7**)

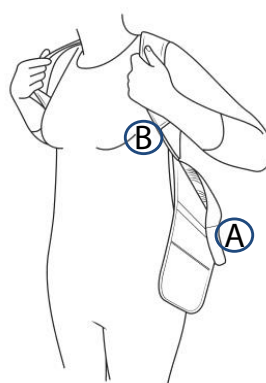


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

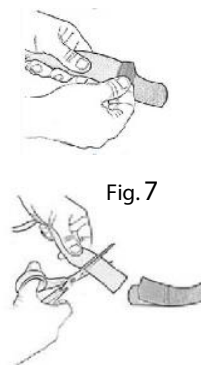


Fig. 7

MANUTENZIONE

Rimuovere il telaio metallico aprendo l'apposita tasca posteriore, dotata di chiusura a velcro. Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Ad asciugatura ultimata re-inserire il telaio nel suo alloggiamento. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

Presenza di marcatura CE che attesta la conformità alle direttiva europea 93/42/CEE

Emissione in data 27 - 04 - 2016
Revisione 0



TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com - info@tenortho.com