

Tutore di gomito con regolazione della flessione-estensione

E-MOTION® ART. TO2300

**La cura del gomito in tutta sicurezza,
leggera e confortevole**

DESCRIZIONE

È un supporto medico-ortopedico progettato per garantire il massimo controllo dell'articolazione del gomito. Grazie alla struttura caratterizzata da valve in materiale plastico e alle aste in alluminio (regolabili in flessione-estensione), si ha il completo controllo dell'articolazione. Il tutore si adatta perfettamente all'anatomia del corpo procurando un piacevole senso di sicurezza e benessere. Inoltre è dotato di elementi aggiuntivi: un supporto per la mano che permette la prono-supinazione ed una fascia in tessuto, utilissima a sostenere il braccio durante il periodo di convalescenza.

CARATTERISTICHE

Ambidestro. Valve in plastica di supporto (omero e avambraccio). Imbottiture traspiranti con rivestimento in tessuto assorbente. Aste articolate in alluminio (regolabili). Regolazione della flessione-estensione di 30° in 30°. Tiranti di chiusura a Velcro. Supporto mano per prono-supinazione (regolabile o asportabile). Cinghia di supporto. Leggero.

INDICAZIONI

POST-OPERATORIO • CONTROLLO MOVIMENTO DI F-E • CONTROLLO PRONO- SUPINAZIONE • TRATTAMENTI CONSERVATIVI • POST-RIMOZIONE GESSO.

APPLICAZIONE

- 1 Regolare le articolazioni sulla gradazione desiderata (con la chiave a brugola in dotazione);
- 2 Aprire i cinturini di fissaggio e posizionare il braccio all'interno delle valve, centrando l'articolazione del gomito con il fulcro centrale delle aste in alluminio;
- 3 Regolare il supporto mano in lunghezza, se necessario regolare anche la prono-supinazione;
- 4 Chiudere i cinturini di fissaggio e assicurarsi che il tutore sia posizionato correttamente;
- 5 Se necessario, applicare la fascia di supporto del braccio.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.