

Tutore d'anca elastico con stabilizzazione laterale

HIP UP

Art. TO3001

**La cura dell'anca in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione. Il tutore è costituito da due componenti: una porzione di tessuto cinge il bacino e si allaccia sull'addome; un'altra porzione viene applicata sull'anca e si unisce con l'altra porzione di tessuto a mezzo velcro.

In questo modo è possibile utilizzare il tutore sia sul lato destro che su quello sinistro a seconda della necessità.

La steccatura funzionale laterale costituita da tre stecche a spirale può essere sostituita con tre stecche più rigide inseribili nelle apposite tasche. In questo modo è possibile modulare il supporto dato in base alle necessità riabilitative.

CARATTERISTICHE

Struttura in materiale elastico composito costituito da tre materiali accoppiati tra loro: "C6 Tex combinato", moltoprene ad alta densità, vellutino elastico ad altissima tenuta.

Chiusura anteriore a doppia mandata facilita l'applicazione e consente una migliore adattabilità alle diverse conformazioni anatomiche del paziente.

INDICAZIONI

POSTOPERATORIO - DISLOCAZIONI DELL'ARTICOLAZIONE - FRATTURE INTERTROCANTERICHE E TRANSTROCANTERICHE DEL FEMORE - RIABILITAZIONE DEI MUSCOLI ABDUTTORI QUADRICIPITI DELLE GAMBE - INCREMENTO DELLA PROPRIOCEZIONE - CONTROLLO DELLA ROTAZIONE DELL'ANCA

APPLICAZIONE

- 1 Aprire entrambe le componenti del tutore
- 2 Unire la cintura con la presa bacino/coscia
- 3 Una volta assemblato avvolgere il tutore attorno alla vita in modo tale che la steccatura si posizioni lateralmente al femore
- 4 Chiudere il tutore sull'addome tramite la doppia chiusura a mezzo velcro
- 5 Chiudere la presa coscia.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.