



Tenortho

Un punto fermo per tornare a muoversi

Cavigliera bivalva universale

THUNDER PLUS® art. TO401

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico di ultima generazione. Il design innovativo, la struttura realizzata in materiale plastico composito, garantiscono all'articolazione una tenuta unica nel suo genere. Le imbottiture risultano di massimo comfort grazie all'elevata portanza dell'espanso utilizzato. Questa caratteristica unita alla speciale termoformatura conferisce al tutore un perfetto adattamento anatomico come fosse su misura.

La doppia chiusura a velcro consente di regolare il livello di contenzione articolare.

Studiata in ogni singolo particolare, assicura il corretto sostegno della caviglia, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Struttura in materiale plastico composito, anatomica, resistente e ambidestra. Imbottiture in espanso ad alta densità termoformate, perfettamente adattabili ad ogni singola struttura anatomica. Supporto calcaneare in vellutino soft touch regolabile a velcro. Sistema di chiusura a due vie. Entrambi i velcri di chiusura sono rivettati su una delle due scocche e possono essere ruotati a seconda della direzione di chiusura preferenziale.

INDICAZIONI

PREVENZIONE DEI TRAUMI DISTORSIVI DELLA CAVIGLIA • TRATTAMENTO DELLE DISTORSIONI DELLA CAVIGLIA • RECUPERO FUNZIONALE DELLA CAVIGLIA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA • ARTROSI DELLA TIBIO-TARSICA • TENDINITI DELLA CAVIGLIA • PREVENZIONE DEI TRAUMI ACCIDENTALI DELLA CAVIGLIA NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA.

APPLICAZIONE

1. Se necessario, regolare il supporto calcaneare con l'apposito velcro
2. Applicare le due valve alla caviglia
3. Tenere la parte superiore del tutore con una mano e stringere, con l'altra mano, le due cinghie di velcro girando attorno alla caviglia
4. Verificare la stabilizzazione del tutore e stringere, se necessario, ulteriormente le cinghie

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Asciugare lontano da fonti di calore.

Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.

Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.

Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro.

L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.

Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.