

SCHEDA TECNICA N° 530

NOME PRODOTTO

MATERASSO AD ACQUA IN 3 SEZIONI

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Sistema antidecubito che sfrutta la distribuzione del peso del corpo sulla superficie d'appoggio per diminuire le pressioni di contatto, anche in corrispondenza dei punti più a rischio.

L'acqua inoltre, essendo un liquido, favorisce notevolmente la distribuzione omogenea dei pesi. Il materasso ad acqua è costituito da elementi in PVC che, riempiti d'acqua e stabilizzati dal bordo di irrigidimento, costituisce un ottimo sistema per la omogenea distribuzione del peso del corpo.

Uso e funzionamento:

- Distendere il lenzuolo di irrigidimento sul materasso tradizionale e gonfiarlo ad aria tramite la pompa in dotazione;
- Riempire d'acqua i tre elementi tramite il tubo in dotazione ed aggiungere il liquido disinfettante;
- Posizionare gli elementi dentro il bordo di irrigidimento

Dimensione elementi 60 x 70 cm

Dimensioni bordo di irrigidimento 2 x 0,9 m

Materiale PVC, spessore 0,4 mm

Accessori:

Cod. PLS015

Descrizione: SEZIONE 60X70 XMATER.AD ACQUA

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

ROW

DESCRIZIONE

Materasso ad acqua cm.195x85, con bordo di irrigidimento ad aria

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

MOVI S.p.A.
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	BD/RDM	CND
I	51953/R	Y033306

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio